

INFINI™

mesopenONE

mesopenONE II™

USER MANUAL



www.infinifiller.com

Kazety

DOSTUPNÉ TYPY:

12 mikroihiel (5 ks pozlátených kaziet) Najintenzívnejšia kazeta pri stimulačné. ošetrenia.Určená na intenzívnu mikroperforáciu pokožky a riešenie náročných estetických problémov, ako sú hlboké vrásky, lifting,jazvy alebo rozšírené póry.

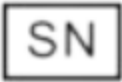
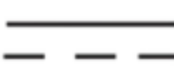
24 mikroihiel (5 ks pozlátených kaziet) Kazeta so strednou intenzitou mikroperforácie. Určená pre atrofickú, jemnú a plytko prekrvenú pokožku.

36 mikroihiel (5 ks pozlátených kaziet)Najjemnejšia kazeta pre ošetrenia. Určená na kombinovanú terapiu s chemickými peelingmi, výživnými procedúrami a farebnými koncentrátmi.

#	REGIÓN	TENKÁ POKOŽKA	HRUBÁ POKOŽKA
1	Čelo	0,25-0,5 mm	0,5-0,75 mm
2	Medzi obočím	0,25-0,5 mm	0,5-1,0 mm
3	Nos	0,25 mm	0,5 mm
4	Okolie očí	0,25-0,5 mm	-
5	Lícne kosti	0,5-1,0 mm	-
6	Líca a brada	0,5-1,0 mm	1,0-2,0 mm
7	Horná pera	0,25 mm	0,25-0,75 mm
8	Jazvy na tvári	1,0-1,25 mm	1,5-2,0 mm
9	Strie	1,5-2,0 mm	1,5-2,0 mm
10	Chirurgické a popáleninové jazvy	2,0 mm	-

Špecifikácia

Názov produktu:TM Wireless Model:
mesopenONE II™
Adaptér: 5V-1000mA
Hmotnosť balenia: 312
Veľkosť balenia: 16912356mm

	Jednosmerný prúd		Sériové číslo
	Striedavý prúd		Zástupca Eú
	Zariadenie triedy I		Značka CE
	Pozor, konzultujte sprievodné dokumenty		Výrobca
	Dátum výroby		Plávajúca aplikovaná časť



Ako používať **TM Wireless Model:** **mesopenONE II™**

Zariadenie je možné používať s vstavanou batériou alebo sieťovým napájaním.

1. Pripojte DC adaptér do konektora.
2. Pripojte DC adaptér do elektrickej zásuvky.
3. Nabíjanie batérie: Pripojte adaptér do elektrickej zásuvky a pripojte ho k napájaciemu rozhraniu.



Príprava

1. Vyberte ihlicovú kazetu zo sterilizovaného obalu.
2. Vložte okrúhly otvor (1) do slotu (2) na prístroji a zatlačte ihlicovú kazetu vodorovne až na doraz.
3. Zablokujte ihlicovú kazetu otočením proti smeru hodinových ručičiek.
4. Ak chcete kazetu odstrániť, otočte ju v smere hodinových ručičiek a potom ju vodorovne vytiahnite.



NFINI mesopenONE

5. Spustenie mesopenONE II™
Stlačte tlačidlo napájania na 2-3 sekundy na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.

Upozornenie

Na ochranu zariadenia ho nedržte obrátene, aby sa predišlo spätnému toku tekutín.

Ako používať

Nastavenie dĺžky ihly

Nastavte hĺbku ihly otočením nastavovacieho krúžku

Otočením v smere hodinových ručičiek sa hĺbka ihly skráti.

Otočením proti smeru hodinových ručičiek sa hĺbka ihly predĺži.



Zobrazenie rýchlosti



6-stupňové nastavenie rýchlosti

Prístroj začína od nízkej rýchlosti a postupne prechádza na vysokú.

Rýchlosť sa zmení pri každom stlačení tlačidla.

Záruka

Záručná doba pre mesopenONE II™ je 12 mesiacov.
Ponúkame opravu alebo výmenu.

Všeobecná údržba

Pred použitím sa uistite, že zariadenie a adaptér
boli skontrolované.

Uchovávajte zariadenie vypnuté. Povrch utrite
suchou handričkou.

Uchovávajte ho mimo priameho slnečného svetla, vysokej
teploty a vlhkosti.

Nenechávajte meranie, opravu alebo úpravu zariadenia
neodbornému personálu.

Ak zariadenie nebolo dlhší čas používané, uistite sa, že funguje
bezpečne a správne.